


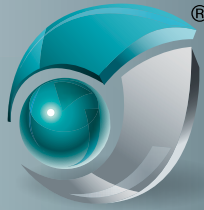

# Symetric®



PROTHÈSE  
INTERMÉDIAIRE  
OU TOTALE  
DE HANCHE

DROITE  
COL 135° OU 125°  
CIMENTÉE OU SANS CIMENT

*Dispositif de classe III, pris en charge  
par les organismes d'assurance maladie.*

[www.aston-medical.com](http://www.aston-medical.com)



## INDICATIONS

Prothèse intermédiaire ou totale de hanche de première intention (fracture du col, coxarthrose primaire ou secondaire, ostéonécrose, arthrite rhumatoïde, déformation osseuse invalidante) ou de reprise simple.

## PRINCIPES

- Prothèse déclinée en 2 versions cimentée et sans ciment de géométrie différente, implantables avec le même ancillaire.
- **Col standard 135° et col varié 125° pour le traitement sans allongement des coxa-vara.**
- Longueur de tige et ancillaire adaptés à une mise en place par voie mini-invasive.

## CARACTÉRISTIQUES

- **La tige cimentée :**
  - est polie sur sa totalité,
  - est pourvue d'une flange de compression du ciment et d'une petite collerette à 30° comme simple témoin d'enfoncement,
  - intègre directement l'épaisseur de ciment par son dimensionnement étudié par rapport à celui de la râpe de même taille nominale.
- **La tige sans ciment :**
  - possède une conicité constante pour un appui osseux métaphysaire quelle que soit la taille,
  - est caractérisée par un épaulement supéro-externe marqué et une diaphyse affinée,
  - est revêtue :
    - d'un bicouche rugueux de titane pur et d'hydroxyapatite en métaphyse haute,
    - d'un monocouche d'hydroxyapatite d'épaisseur 100µm sur substrat corindonné en zone métaphyso-diaphysaire,
    - d'un monocouche d'hydroxyapatite d'épaisseur 50µm sur substrat quasi-lisse en diaphyse inférieure.
- **Le col :**
  - est affiné et de longueur croissante avec la taille de tige,
  - est décliné en 2 angles CCD, 135° et 125°,
  - est pourvu d'un **cône cervical 6°/10-12** (SpD1= 10,37).

## MATÉRIAUX

- Tige cimentée : acier inoxydable (ISO 5832-9).
- Tige sans ciment : alliage de titane (ISO 5832-3).
- Revêtement d'hydroxyapatite et double revêtement de titane pur et d'hydroxyapatite sur la tige sans ciment (selon spécifications du fabricant et normes en vigueur).

## RÉFÉRENCES DES IMPLANTS

TIGE CIMENTÉE COL 135° - CÔNE 6°/10,37							
Taille	1	2	3	4	5	6	7
Référence	10010824	10020824	10030824	10040824	10050824	10060824	10070824

TIGE CIMENTÉE COL 125° - CÔNE 6°/10,37							
Taille	1	2	3	4	5	6	7
Référence	10010825	10020825	10030825	10040825	10050825	10060825	10070825

TIGE SANS CIMENT COL 135° - CÔNE 6°/10,37								
Taille	-	2	3	4	5	6	7	8
Référence	-	10020920	10030920	10040920	10050920	10060920	10070920	10080920

TIGE SANS CIMENT COL 125° - CÔNE 6°/10,37								
Taille	-	2	3	4	5	6	7	8
Référence	-	10020925	10030925	10040925	10050925	10060925	10070925	10080925

## RÉFÉRENCES DE L'ANCILLAIRE

Panier d'impaction A36264 ; panier de râpes A36296.

Groupe OCTOPHORON



Fabricant: Aston Medical

Tél 33 (0)4 77 93 00 04 - Fax 33 (0)4 77 74 35 93

Z.I. Montreynaud - 19 rue V. Grignard - 42000 Saint-Étienne - France

www.aston-medical.com

*Le présent document n'a pas de valeur contractuelle, le fabricant se réservant le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité du produit. Les conditions d'utilisation de l'implant sont formulées dans la notice d'instructions.*

